



# Att exportera registrering från CardioVisions.

1. Starta CardioVisions.
2. Öppna den registrering som skall exporteras.
3. Klicka på menyn *Verktøy* och välj *Exportera data / CardioVisions format*.

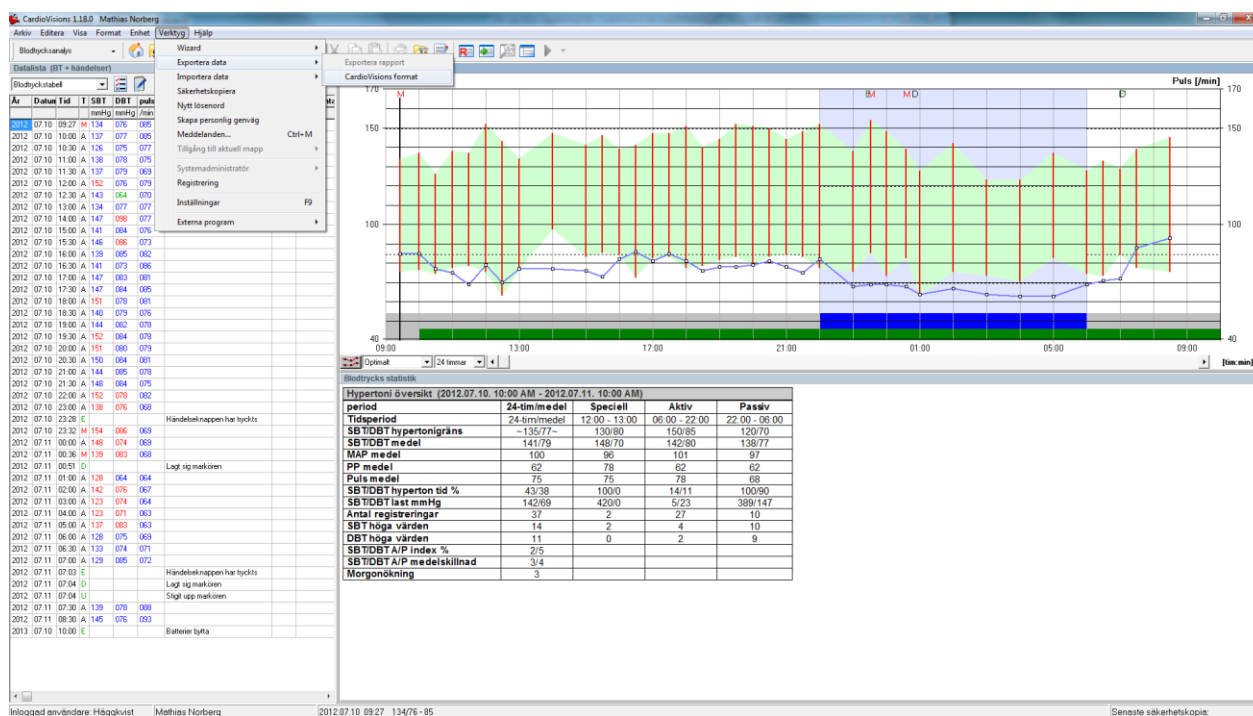

4. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på ikonen för *Skrivbord* som vanligtvis återfinns på vänster sida i fönstret. I rutan för *Filnamn:* som återfinns i nedre delen av fönstret anger du ett namn för den fil som du skall exportera. Du kan ange vilket namn som helst. Klicka därefter på *Spara* knappen.

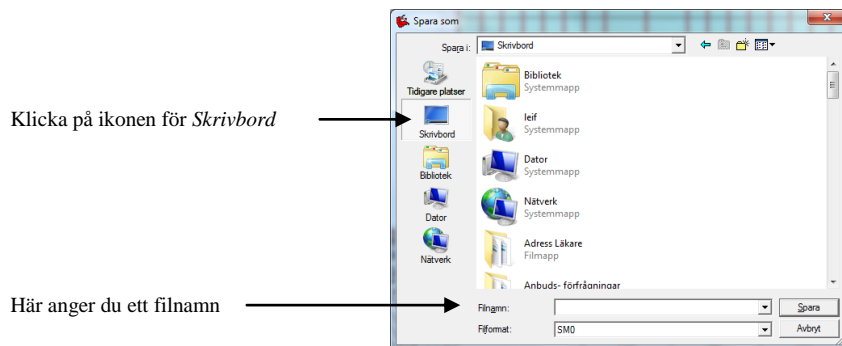

5.

Den exporterade filen skall nu återfinnas på din dators skrivbord.

6.

Mejla filen till följande adress:

[leif@meditech.nu](mailto:leif@meditech.nu)

Lycka till!



**Leif Häggkvist**

Meditech Sverige AB

Box 380

761 24 Norrtälje

0176 - 208570

0708 - 733 987

