


## Att byta patientidentitet på en lagrad registrering.

1.  
Öppna den registrering som har felaktig patientidentitet.

2.  
Klicka på menyn "Arkiv" och "Spara som...", varvid fönstret "Spara som... - Ny patient eller välj patient" öppnas.

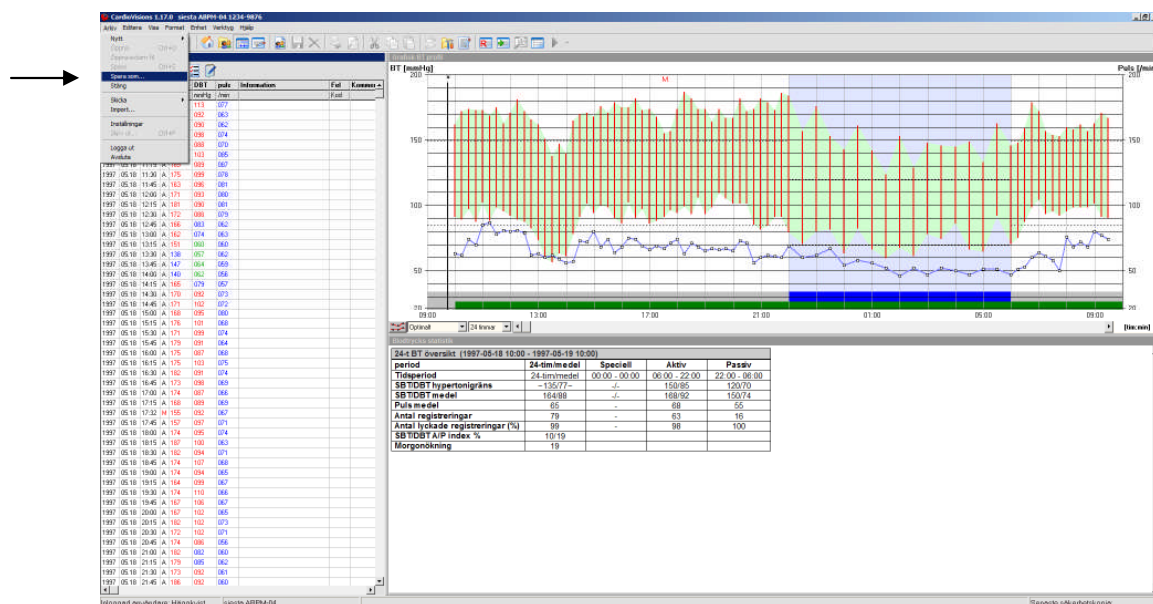

The dialog box 'Spara som... - Ny patient eller välj patient' is shown. It contains fields for 'Mapp', 'Patient info', 'Pers.nr.', 'Efternamn', and 'Förnamn'. Below these fields is a radio button group for 'Visa alla', 'Visa liknande', and 'Visa identisk (1)'. A table below shows a list of patients with columns for 'Titel', 'Pers.nr.', 'Förnamn', 'Andra namn', 'Efternamn', and 'Kön'. The patient with ID 1234-9876 and name 'siesta' is selected.

Titel	Pers.nr.	Förnamn	Andra namn	Efternamn	Kön
	1234-9876	siesta		ABPM-04	

3.  
Fyll i det korrekta personnumret i fältet för personnummer och klicka på TAB tangenten, varvid ett fönster med den korrekta patientidentiteten visas om denna finns i databasen sedan tidigare. Klicka på OK knappen varvid registreringen sparas med den nya identiteten. Du kan nu se den korrekta patientidentiteten i övre vänstra hörnet på CardioVisions programmet.

4.

Om det finns en rapport skapad sedan tidigare, så innehåller denna rapport fortfarande den tidigare (felaktiga) patientidentiteten. Klicka på "Rapporter" ikonen för att kontrollera detta. För att ändra på detta så går du tillbaka till utvärderingsfönstret genom att klicka på "Utvärdering" ikonen.

5.

Klicka nu på menyn "Editera" och välj "Återställ rapporten" från rullgardinsmenyn.

6.

Klicka på ikonen "Kopiera standard rapporten till rapporten" (ikonen med det röda R:et), varvid det skapas en ny rapport med korrekt patientidentitet.

7.

Den registrering som hamnade under felaktig patientidentitet finns fortfarande kvar och måste alltså raderas.

8.

Klicka på ikonen "Databasen", du får en fråga om du vill spara de ändringa som gjorts, svara JA på detta.

9.

Sök upp den patient som har den felaktiga registreringen och radera denna registrering genom att högerklicka på registreringen och välja radera.